



Microdacyn[®]₆₀ Wound Care

Traitement efficace des plaies chroniques et/ou infectées



Qu'est-ce que Microdacyn₆₀[®] Wound Care

Microdacyn₆₀[®] Wound Care est une solution prête à l'emploi à base d'oxygène actif (eau super oxydée) Microdacyn₆₀[®] Wound Care est élaboré grâce à la technologie brevetée d'Oculus Innovative Science avec de l'eau ultra-pure et une petite quantité de NaCl.

Principes d'action de Microdacyn₆₀[®] Wound Care

Les substances propres du Microdacyn₆₀[®] Wound Care, c'est à dire l'acide hypochloreux (HOCl) sert à la conservation de la solution par un mécanisme de défense physique contre les agents pathogènes qui est également utilisé dans le corps humain: les corps étrangers ne sont pas éliminés par un processus chimique mais par un procédé physique purement naturel.

Osmolyse non spécifique – l'éclatement des cellules

La solution de lavages hypotonique Microdacyn₆₀[®] Wound Care assure que l'écart de la solution avec les cellules augmente la quantité de liquide pénétrant dans les cellules afin d'équilibrer le gradient osmotique et de provoquer une osmolyse (choc osmotique non spécifique): en raison de la pression interne croissante, les cellules éclatent.



Les effets mécaniques de la solution stérile

La solution de lavage des plaies Microdacyn₆₀[®] Wound Care facilite l'élimination mécanique des micro-organismes et des déchets cellulaires. Les **micro organismes** ainsi que d'autres constituants solubles sont largement éliminés par lavages avec soin des plaies.

Microdacyn₆₀[®] Wound Care peut aussi être utilisé pour le trempage des plaies. Il facilite le **débridement** et lyse également plus rapidement les cellules endommagées qui sont présentes massivement sur des plaies infectées ou contaminées.

Stérilité & effet de l'agent conservateur

Les substances conservatrices de Microdacyn₆₀[®] Wound Care, c'est-à-dire l'acide hypochloreux possède d'excellentes propriétés **anti-microbiennes** et la stérilité de la solution au cours de l'application est garantie. Elle élimine également efficacement et rapidement les mauvaises odeurs pouvant se dégager des plaies.

Microdacyn₆₀[®] Wound Care est le seul sterylth qui contient une salinité et une teneur en chlore légères qui garanti un ph neutre. Compatible avec tous les pansement, substituts dermiques et la larvothérapie. Il peut également être mis sous un pansement occlusif ainsi que le V.A.C. Ultra[®], V.A.C. Ultra[®], Debritol[™]

Bulletin de commande

Nom du Produit	Unité	Emballage	Carton	No de commande	Pharmacode
Microdacyn ₆₀ [®] Hydrogel	60 g	1 pce	24 pce	44211-00	7596473
Microdacyn ₆₀ [®] Hydrogel	120 g	1 pce	6 pce	44209-00	6014701
Microdacyn ₆₀ [®] Wound Care	100 ml	1 pce	12 pce	44110-00	7596467
Microdacyn ₆₀ [®] Wound Care Spray	250 ml	1 pce	12 pce	44107-00	6014687
Microdacyn ₆₀ [®] Wound Care	500 ml	1 pce	24 pce	44102-00	6014670
Microdacyn ₆₀ [®] Wound Care	990 ml NPWT	1 pce	6 pce	44199-00	6014693